

Instrucțiuni de utilizare

Histolog[®] Viewer

versiunea 2.1.1



SamanTree Medical (Switzerland) SA

Avenue de Provence 12

1007 Lausanne

Elveția

Tel: +41 21 625 0940

Serviciul pentru clienți:

Tel: +41 21 623 0073

contact@samantree.com

Copyright © 2015–2026

Această publicație este protejată prin drepturi de autor și toate drepturile sunt rezervate. Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă sau transmisă, fără permisiunea SamanTree Medical, în nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere și înregistrare, în niciun alt scop decât pentru utilizarea personală de către cumpărător.

1. Istoricul revizuirilor

Versiune	Data	Descrierea modificării
1.0	2020-12-18	Document nou pentru versiunea 2.0.0 a aplicației Histolog® Viewer și pentru versiunea 1.1.1 a ghidului Histolog®.
1.1	2021-03-12	Versiune îmbunătățită a documentului cu explicații mai detaliate ale funcționalităților aplicației Histolog Viewer.
1.2	2025-05-19	Versiune nouă a documentului cu actualizări pentru versiunea 2.1.0 a aplicației Histolog® Viewer.
1.3	2025-05-27	Actualizarea Notelor din Secțiunile 8 și 12. Adăugarea informațiilor despre raportarea incidentelor în Secțiunea 4. Revizuirea datelor de contact ale persoanei responsabile din Regatul Unit.
1.4	2026-05-26	Actualizări pentru versiunea 2.1.1 a aplicației Histolog® Viewer. - Actualizarea Secțiunii 5.1.1. „Cerințe privind stația de lucru”. - Adăugarea Secțiunii 6.3 „Selectarea unei surse de date” și a Secțiunii 7 „Lucrul cu sursele de date” pentru a introduce noua funcționalitate de lucru cu mai multe surse de date. - Adăugarea Sec

2. Cuprins

1. Istoricul revizuirilor	3
2. Cuprins	4
3. Explicarea simbolurilor	6
4. Informații despre produs	7
4.1. Utilizarea prevăzută	7
5. Instrucțiuni de siguranță	8
5.1. Atenționări	8
6. Instalarea și dezinstalarea	9
6.1. Cerințe de sistem	9
6.1.1. Cerințe privind stația de lucru	9
6.1.2. Cerințe privind monitorul	9
6.3. Instalarea aplicației Histolog® Viewer	10
6.4. Dezinstalarea aplicației Histolog® Viewer	12
7. Pornirea și ieșirea	13
7.1. Pornirea aplicației Histolog® Viewer	13</

Filtrarea după un cuvânt cheie	35
Filtrare după categorii	35
11.2. Selectarea imaginilor	35
11.2.1. Selectare/deselectare globală	35
11.2.2. Selectarea/deselectarea sesiunilor	36
11.2.3. Selectarea/deselectarea imaginilor	36
11.3. Ștergerea imaginilor	36
11.4. Restabilirea imaginilor șterse	37
11.5. Ștergerea definitivă a imaginilor	37
11.6. Configurarea aspectului	37
11.7. Panoul de informații	37
12. Vizualizarea imaginilor	39
12.1. Panoul de informații	39
12.2. Navigare: Mărire/micșorare și panoramare	39
12.3. Hartă de culori, reglarea contrastului	39
12.3.1. Harta de culori	39
12.3.2. Reglarea contrastului	


3. Explicarea simbolurilor

	Producător
	Consultați instrucțiunile de utilizare
	Când este urmat de „ ATENȚIE ”, acest simbol înseamnă „Atenție! Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea echipamentului, pierderea timpului sau efort risipit sau la necesitatea de a abandona utilizarea dispozitivului.”
	Un semn „NOTE” în acest manual atrage atenția asupra informațiilor utile cu privire la o funcție sau procedură.


6.2. Instalarea aplicației Histolog[®] Viewer

Instalați aplicația Histolog[®] Viewer urmând pașii de mai jos:


1. Obțineți de la persoana autorizată de contact fișierul de instalare a aplicației Histolog[®] Viewer (.exe pe Microsoft Windows)
2. Faceți dublu clic pe fișierul de instalare pentru a porni expertul de instalare
3. Verificați informațiile privind cerințele minime și recomandate, apoi faceți clic pe „Next” (Înainte) pentru a continua

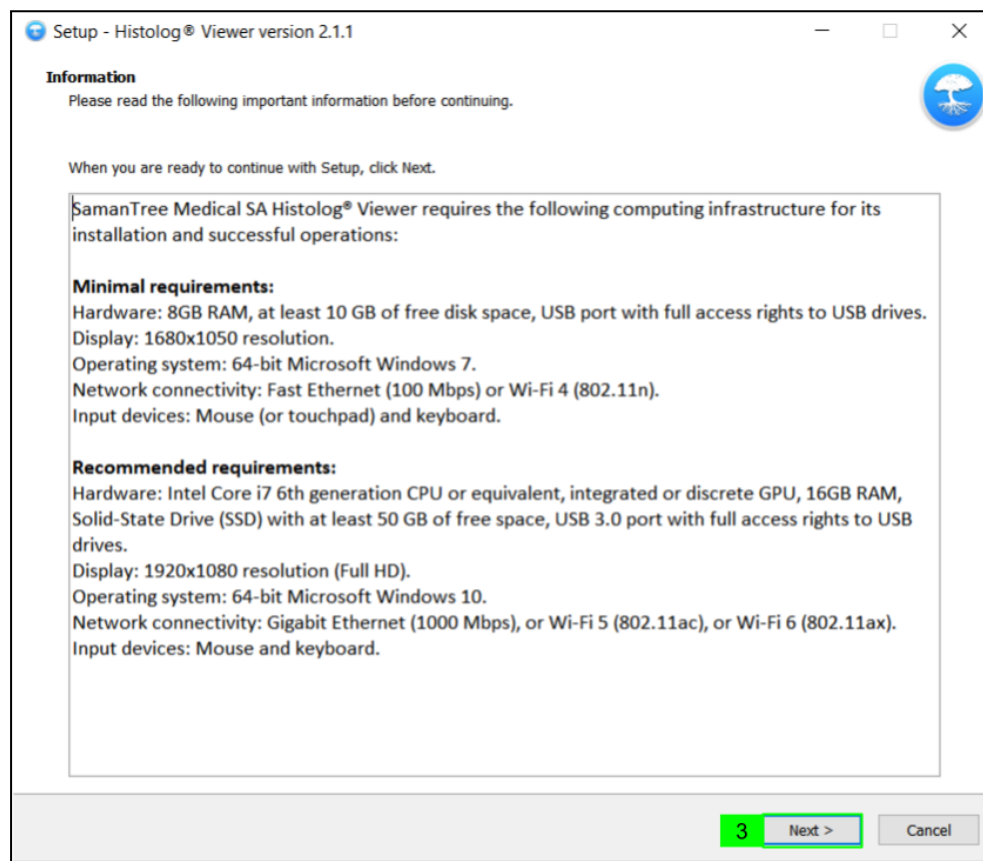

4. Selectați folderul de destinație și faceți clic pe „Next” (Înainte) pentru a continua

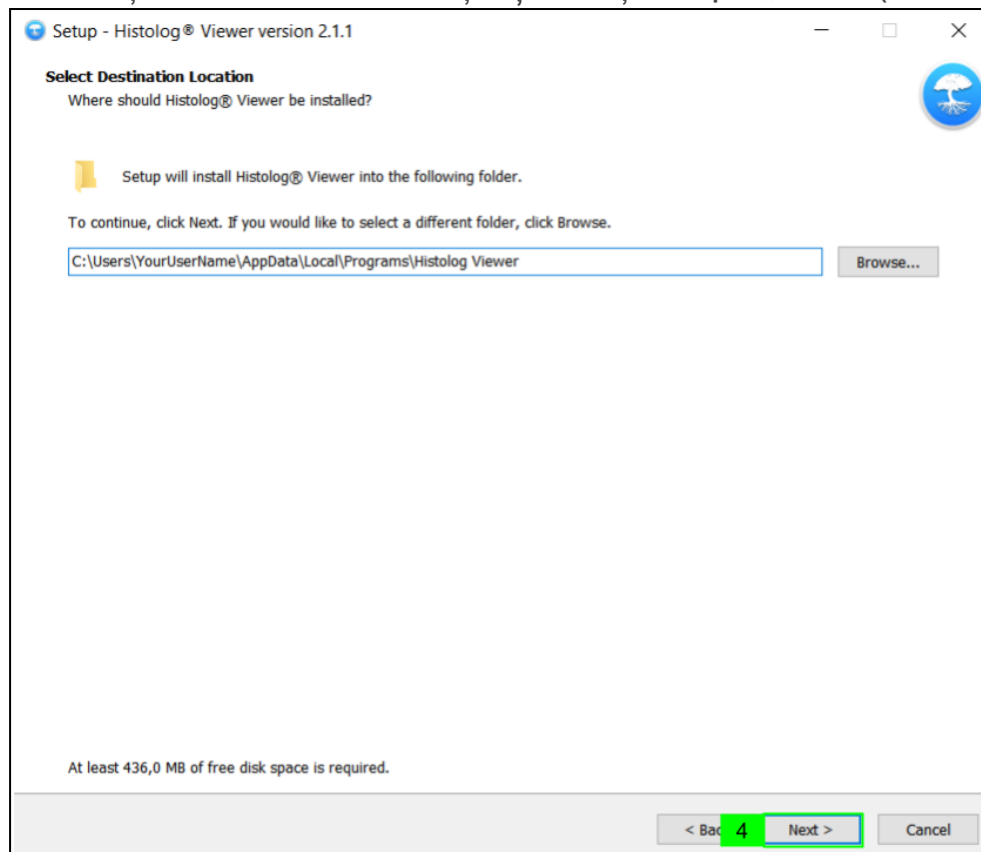

5. Alegeți dacă doriți să fie creată o comandă rapidă pe desktop (5A) și faceți clic pe „Next” (Înainte) (5B) pentru a continua

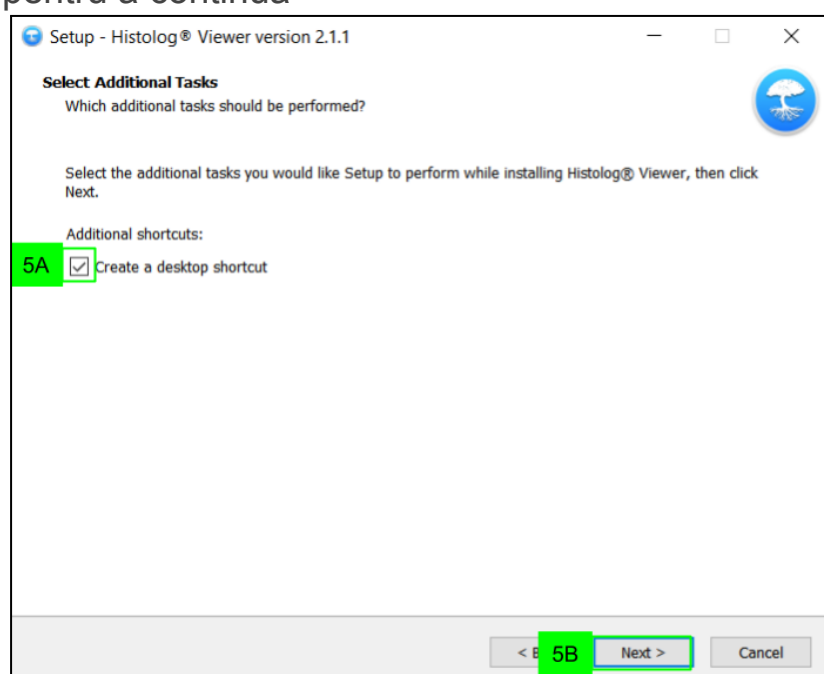

7.3.1. Crearea unui utilizator nou și autentificarea

Choose a user to login or enter a new user name

John Doe

2

1

John Doe

3

new

Change language

4

Back

Next

1. Faceți clic în caseta de text
2. Scrieți numele noului utilizator

NOTĂ La tastarea numelui acesta se va adăuga ca utilizator în listă cu marcajul „New” (Nou)

3. Alegeți noul utilizator din lista de mai jos
4. Faceți clic pe „Next” (Înainte) pentru a continua sau pe „Back” (Înapoi) pentru a reveni la ecranul cu sursele de date

5. Vizualizați formularul „Create password for the new user” (Creați parola pentru noul utilizator)
6. Faceți clic în caseta de text „Enter password” (Introduceți parola)
7. Introduceți parola nouă

NOTĂ Par


7.3.2. Autentificarea cu un utilizator existent

1. Selectați utilizatorul din listă


NOTĂ Dacă tastați un șir de caractere în caseta de text (A), conținutul listei va fi filtrat și se vor afișa numai numele de utilizator care conțin acel șir de caractere.

2. Faceți clic pe „Next” (Înainte) sau faceți dublu clic pe numele de utilizator
3. Vizualizați formularul „Enter password” (Introduceți parola)

4. Alegeți limba necesară
5. Selectați limba dorită (5A) sau anulați schimbarea limbii (5B)

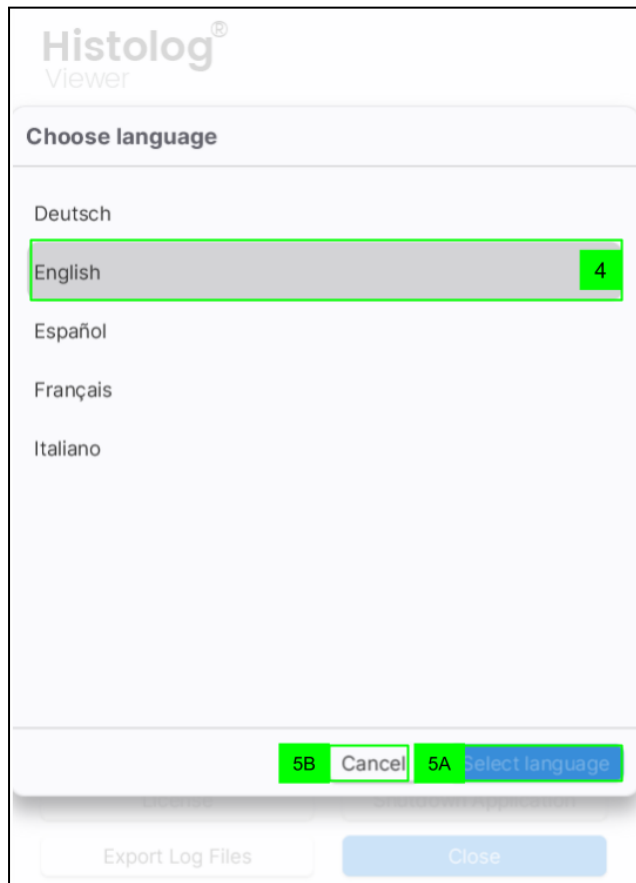

6. Vizualizați fereastra de confirmare cu avertismentul privind necesitatea repornirii aplicației după schimbarea limbii. Confirmați acțiunea (6A) sau reveniți la lista de limbi (6B)

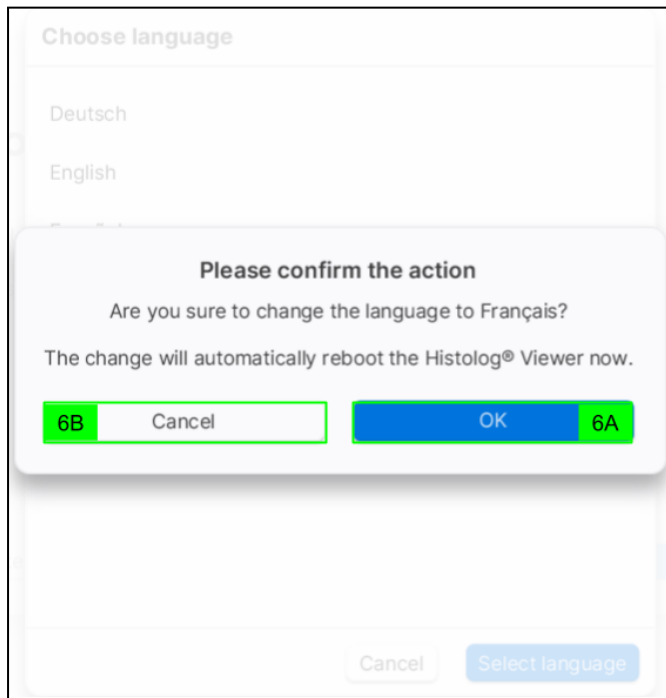

7. Verificați dacă aplicația este repornită cu interfața cu utilizatorul prezentată în limba selectată

Alternativ,

8. Alegeți opțiunea „Change Language” (Schimbare limbă) din lista de utilizatori de pe ecranul de autentificare

